

Tutorial de coleta e envio de amostras

BrAIN REGISTRY



BrAIN
Brazilian Autoimmune
encephalitis Network

Coleta de líquido e sangue



Tubo falcon



Tubo roxo



Tubo amarelo

É necessário coletar:


- 1 tubo Falcon com 3-5ml de LCR
- 1 tubo roxo com 5ml de sangue
- 1 tubo amarelo com 5ml de sangue

Os tubos roxo e amarelo devem ser **centrifugados no dia da coleta.**

**** O tubo roxo em até 4 horas da coleta!**



Após centrifugar:

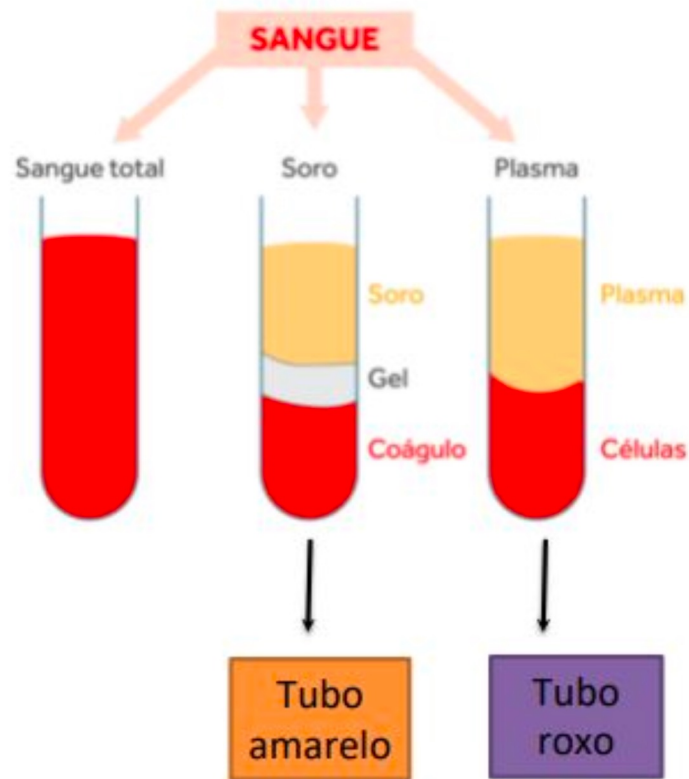

- Tubo roxo produz **Plasma**
- Tubo amarelo produz **Soro**



Tubo roxo:



- Centrifugar a 3000G por 10min
- Temperatura de 18 graus
- Transferir todo o plasma com pipeta estéril.
- Identificar o tubo como “PLASMA”, com o NOME COMPLETO do paciente em letra legível.
- Enviar apenas o plasma, não é necessário enviar o tubo roxo com hemácias!



Tubo amarelo:



- Centrifugar a 3000G por 5min
- Temperatura 18 graus
- Transferir todo o soro com pipeta estéril.
- Identificar tubo como “SORO”, com o NOME COMPLETO do paciente em letra legível.
- Enviar apenas o soro, não é necessário enviar o tubo amarelo com hemácias!



Após a coleta: ARMAZENAMENTO

- Após a centrifugação e separação, as amostras de soro, plasma e liquor podem ser armazenadas em freezer a -20 graus até o envio.



Orientações:

- É proibido o embarque em tubo de urina.
- Utilize tubos de rosca (tubos de pressão podem abrir) e passe parafilme em todos os tubos para evitar vazamentos.



Acondicionamento de amostras

- Envie as amostras “em pé”, na vertical, para evitar derramamentos no transporte



Caixa de isopor com gelox, dentro de caixa homologada para transporte de amostras biológicas



Amostras acondicionadas na vertical em caixas colmeia dentro da caixa de isopor



Transporte das amostras

BrAIN REGISTRY



BrAIN
Brazilian Autoimmune
encephalitis Network

Transporte das amostras

- **Contrate uma empresa de transporte de material biológico.**
- Telefone de contato de empresas de transporte:
 - Rodoair: (11) 5031-6357
 - Fedex: (11) 3003-3339
 - Biofenix: (11) 98314-4996
 - Bio Transportes: (11) 2021-0011
- **É proibido enviar amostras biológicas por sedex!**



Entrega das amostras

BrAIN REGISTRY



BrAIN
Brazilian Autoimmune
encephalitis Network

Entrega das amostras:

Realizar a entrega do material no Hospital Israelita Albert Einstein, no seguinte endereço:

Rua Comendador Elias Jafet n.755, Piso L4 – laboratório de neurociências, Morumbi, São Paulo – SP

RAMAL 73354 / 71031 / 79542

Aos cuidados das **enfermeiras Alda e Karina**

*** Importante: As entregas devem ser feitas apenas em horário comercial, até as 17 horas.**



Entrega das amostras:

Sempre que houver entrega de material comunicar à Lívia (liviaadutra@hotmail.com) ou João Henrique (jhfregadolli@gmail.com) antes da chegada do material.

Não envie materiais sem aviso prévio!

Obrigada

